


CONTACT LENS INSTRUCTION SHEET

PRINT BLACK ON 45LB TEXT

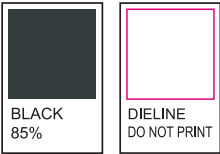

FRONT

BACK

4.250"

2.500"

SOAKING AND STORING YOUR LENSES
Use fresh multi-purpose (contact lens disinfecting) solution each time you soak or store your lenses.

OLD SOLUTION
Do not re-use or “top up” old solution that was left in your lens case. This reduces the effects of the disinfectant and could lead to severe infection, vision loss or blindness.

LENS CASE CARE

- Clean contact lens case with fresh, sterile disinfecting contact lens cleaner. NEVER USE WATER. Cleaning should be followed by rinsing with fresh, sterile contact lens cleaner and wiping with a fresh, clean tissue. Never air dry or re-cap the lens case without cleaning and rinsing it first. If air drying, make sure there is no residual solution inside the case before leaving it to dry.
- Contact lenses can be a source for bacteria growth, so replace your contact lens case at least once every 3 months.

WARNING:
Use of this lens case with heat may cause warping. Use this case for storage during chemical disinfection only, do not place in or near sources of heat.

VERRES DE CONTACT: TREMPAGE ET ENTREPOSAGE
Utilisez une solution à multiples usages (désinfectant pour verres de contact) à chaque fois que vous faites tremper ou que vous rangez vos verres de contact.

SOLUTION DÉJÀ UTILISÉE
Évitez de réutiliser ou de combler la solution qui se trouve encore dans le boîtier des verres de contact. Cela diminue l'efficacité du désinfectant et pourrait mener à des infections sérieuses, perte de la vue ou la cécité.

ENTRETIEN DE L'ÉTUI

- Nettoyez le boîtier avec de la solution désinfectante stérile fraîche. NE JAMAIS UTILISER DE L'EAU. Par la suite, rincez avec de la solution désinfectante fraîche et essuyez avec un chiffon propre. Ne pas laisser à l'air ou refermer le boîtier sans le nettoyer et le rincer au préalable. Si vous laissez sécher le boîtier à l'air, assurez-vous qu'il ne reste aucune trace de solution à l'intérieur.
- Les verres de contact sont une source de croissance bactérienne. Il serait bon de remplacer vos verres de contact au moins une fois à tous les trois mois.

EAU
Évitez de ranger ou de rincer vos verres de contact avec de l'eau ou une solution non stérile. L'usage de tels éléments pourrait mener à une infection sérieuse, perte de la vue ou la cécité.

BAIGNADE
Évitez de mouiller les verres de contact pendant que vous les portez. L'eau peut contenir des micro-organismes qui peuvent mener à l'infection. Si vos verres de contact entrent en contact avec l'eau d'une piscine, d'un lac ou de l'océan, vous devriez vous en débarrasser et les remplacer sur le champ. Demandez à votre spécialiste en soins oculaires de vous conseiller si vous désirez porter vos verres de contact pendant des activités aquatiques.

ATTENTION
Si le boîtier entre en contact avec de la chaleur, cela peut le déformer. Servez-vous du boîtier seulement pour la désinfection chimique et ne le posez près d'une source de chaleur.

FOLD LINE

FOLD LINE

FOLD LINE